





CONTENU DU KIT : 4 tubes spécifiques pour prélèvement sanguin

- 1
- Témoin négatif = **tube gris**
 - Antigène TB1 conçu pour stimuler les lymphocytes CD4 = **tube vert**
 - Antigène TB2 conçu pour stimuler les lymphocytes CD4 et CD8 = **tube jaune**
 - Témoin positif avec mitogène = **tube violet**

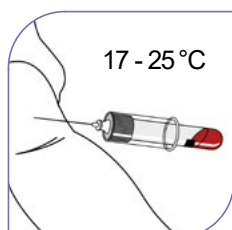


Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir les 4 tubes jusqu'à la marque noire (1ml).

NB : En cas d'utilisation d'une épicroânienne, purger préalablement la tubulure avec un tube sec.

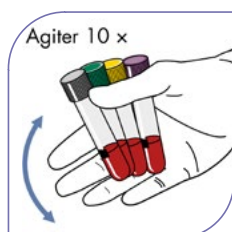

Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.


Au laboratoire, agiter vigoureusement les tubes 10 fois pour que toute la surface du tube soit recouverte de sang et solubilise les composants fixés sur la paroi.

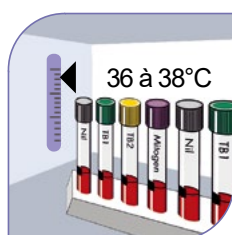

4 Incuber les tubes verticalement de 36 à 38°C pendant 16h à 24 heures.

Après l'incubation, centrifuger les tubes (par exemple : 15 min entre 2000 et 3000 g).

Vérifier que le gel séparateur s'est correctement positionné entre les globules rouges et le plasma. Ne pas ouvrir ou décanter les tubes.

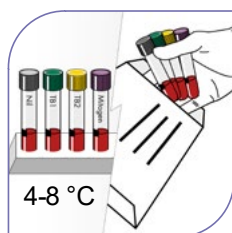

Conserver et envoyer les tubes entre +4 °C et +8 °C (Stabilité 4 semaines).

Noter le n° de lot de chacun des tubes sur le bon de demande.

Merci de renseigner le contexte, cocher le code correspondant à la demande et nous retourner ce bon

Nom du patient : Prénom : Date de naissance : [][]/[][]/[][][][]

- ☐ Enfant migrant de moins de 15 ans
- ☐ Patient infecté par le VIH
- ☐ Avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF
- ☐ Dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire, aide au diagnostic de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic difficile chez l'enfant ou de tuberculose extra pulmonaire.
- ☐ Si exposition documentée à un cas index : enquête autour d'un cas index. (uniquement si > 15 ans)

☐ **QANR**
Analyse prise en charge
= remboursée

- ☐ Personnel professionnellement exposé à l'embauche
- ☐ Toute autre situation

☐ **QANH**
Analyse non prise
en charge
= non remboursée

LES TUBES NON INCUBÉS ET/OU NON CENTRIFUGÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.