


Un niveau minimum d'urine est requis afin de réaliser les Examens CytoBactériologiques des Urines (ECBU).

Les tubes comportent du borate (agent stabilisant la croissance bactérienne). En cas de volume insuffisant, le borate n'est pas assez dilué : nos milieux de culture resteront alors faussement négatif alors que votre patient a une infection urinaire.

Il est alors IMPERATIF de remplir les tubes de façon optimale : au moins jusqu'au trait « Min. ».

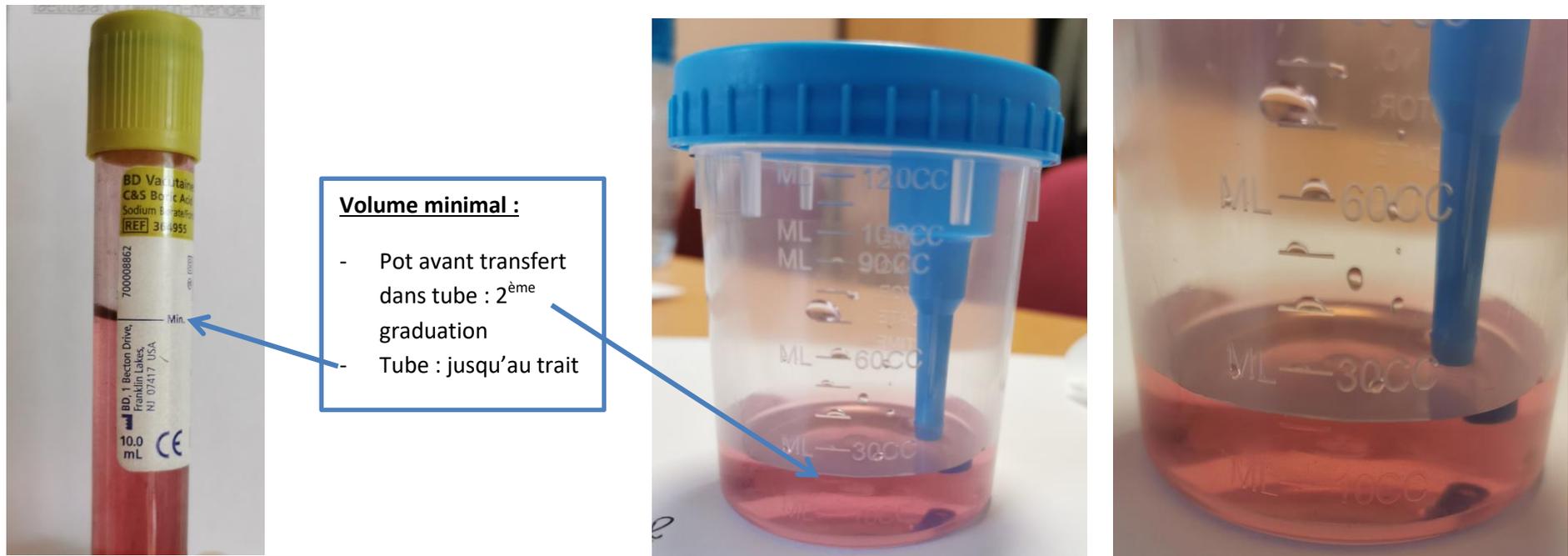

En cas de **volume insuffisant**, envoyez directement le pot et transmettre le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible. **Il est formellement interdit de transvaser l'urine du tube dans le pot** (le borate se transvasera aussi).